

SCHEREN IN TUTTLINGER-QUALITÄT

PFLEGETIPPS FÜR IHRE INSTRUMENTE DER KLASSE TUTTLINGER-QUALITÄT (DEUTSCHE QUALITÄT) UND STATIONSQUALITÄT

Vor dem erstmaligen Gebrauch sollte das Instrument mit einer weichen Bürste gut gereinigt werden und danach unter destilliertem Wasser von allen Detergenzienrückständen befreit werden, um sicherzustellen, dass alle Fabrikationsreste abgespült wurden.

Nach Einsatz der Instrumente müssen diese sofort eingeweicht werden, damit Gewebepartikel, Blut, Eiweiß und ätzende Arzneimittel nicht am Instrument antrocknen. Gelenke der Instrumente müssen weit geöffnet, zerlegbare Teile müssen auseinandergenommen werden.

Während der Reinigung sind alle Gelenke, Zähne, Riefen, Schneiden, Durchsteckschlüsse, Sperren, Mäuler und alle anderen konkaven Vertiefungen auf evtl. Rückstände zu untersuchen und zu säubern, da diese während der Sterilisation so festkleben könnten, dass das Instrument in seiner Gängigkeit und gesamten Funktion beeinträchtigt ist.


Anschließend ist es wichtig, die Instrumente mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser gründlich nachzuspülen, da Leitungswasser korrosive Stoffe enthält (z. B. Chloride, Nitride, Nitrate, Sulfide, Sulfate und Rostpartikel), die den Edelstahl während des Sterilisationsprozesses angreifen würde. Die möglichen Folgen einer falschen Behandlung könnten sein:

- angelaufene, verfärbte, verfleckte oder angerostete Instrumente
- Chlorid-Lochkorrosion oder Spannungsriss, Korrosionen

Die gesäuberten Instrumente müssen per Hand getrocknet und dann mit reinem Paraffinöl (DAB8) eingeölt werden. Danach müssen die Instrumente auf einer weichen Unterlage in nicht überfüllten Sterilisierkörben gelagert werden (schwere Teile nach unten, leichte Teile nach oben legen).

Der Sterilisationsprozess kann nun eingeleitet werden.


Quelle: CBC

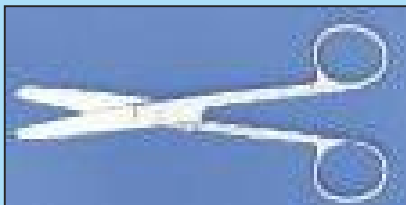

Chirurgische Schere

Schere in Tuttlinger-Qualität.


8302663	1 St. stumpf/stumpf gerade 14,5 cm	9,50
8302686	1 St. spitz/spitz gerade 14,5 cm	9,50

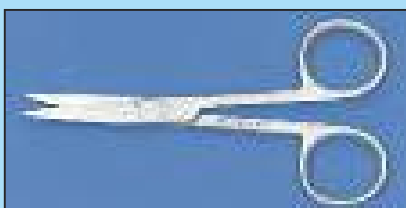

Chirurgische Schere

Schere in Tuttlinger-Qualität.

8125221	1 St. spitz/spitz gebogen 11,5 cm	9,20
---------	-----------------------------------	------

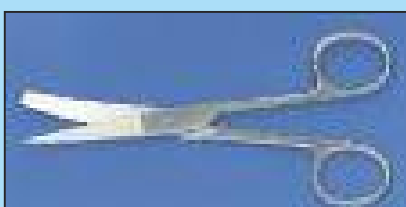


Chirurgische Schere

Schere in Tuttlinger-Qualität.

8125020	1 St. spitz/stumpf gebogen 14,5 cm	9,50
---------	------------------------------------	------


■ SCHEREN IN TUTTLINGER-QUALITÄT

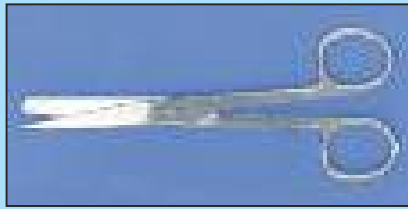

Chirurgische Schere

Schere in Tuttlinger-Qualität.


8126835	1 St. spitz/stumpf gerade 14,5 cm	9,50
---------	-----------------------------------	------

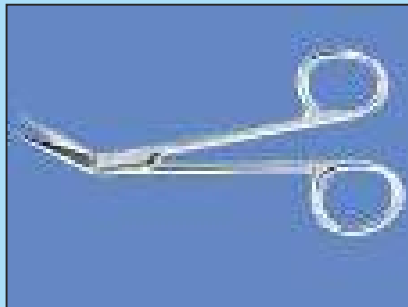

Iris-Schere

Schere in Tuttlinger-Qualität, 11,5 cm, abgewinkelt.

9511235	1 St. 11,5 cm	29,00
---------	---------------	-------

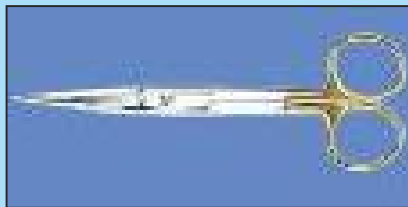

Chirurgische Schere mit Hartmetalleinlage

Weitere Instrumente auf Anfrage.

9511251	1 St. spitz/stumpf gerade 14,5 cm	49,00
9511252	1 St. stumpf/stumpf gerade 14,5 cm	49,00
9511253	1 St. spitz/spitz gerade 14,5 cm	49,00
9511254	1 St. spitz/stumpf gebogen 14,5 cm	49,50
9511255	1 St. stumpf/stumpf gebogen 14,5 cm	49,50
9511256	1 St. spitz/spitz gebogen 14,5 cm	49,50



Verbandschere nach Lister

Verbandscheren in Tuttlinger-Qualität.

8125296	1 St. 14,5 cm	8,90
8302700	1 St. 16 cm	13,95
8125362	1 St. 18 cm	14,50
8125439	1 St. 20 cm	15,70

■ SCHEREN IN STATIONSQUALITÄT



Verbandschere nach Lister

Verbandschere in Stationsqualität, stainless, geprüfte Qualität, einzeln im Polybeutel.

8125333	1 St. 14,5 cm	4,45
8301267	1 St. 16 cm	5,30
8125304	1 St. 18 cm	6,45
8125267	1 St. 20 cm	7,30

SCHEREN IN STATIONSQUALITÄT



Universalschere

Universalschere mit schwarzem Plastikgriff.

9510730	1 St. 18 cm	3,10
---------	-------------	------

PINZETTEN IN TUTTLINGER-QUALITÄT



Pinzette

Pinzette in Tuttlinger-Qualität.

8125497	1 St. anatomisch 14,5 cm	4,85
---------	--------------------------	------

8125557	1 St. chirurgisch 14,5 cm	5,25
---------	---------------------------	------

Splitterpinzette

Splitterpinzette in Tuttlinger-Qualität.

8302723	1 St. Feilchenfeld 9 cm	5,65
---------	-------------------------	------


8125623	1 St. Feilchenfeld 11,5 cm	6,10
---------	----------------------------	------

Splitterpinzette Uhrmacher

Pinzette nach Uhrmacher.

9510731	1 St. 12 cm gebogen	8,65
---------	---------------------	------

9511231	1 St. 11 cm gerade (ohne Abbildung)	8,40
---------	-------------------------------------	------

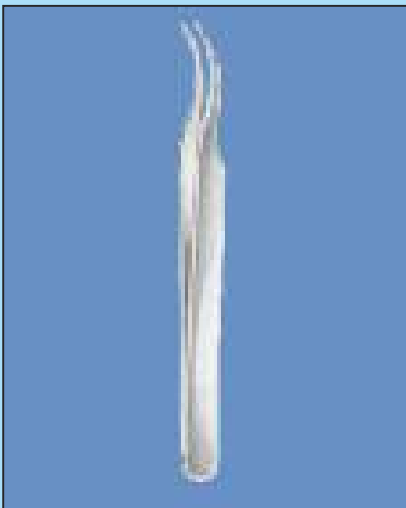

PINZETTEN IN TUTTLINGER-QUALITÄT




Ohrpinzette

Ohrpinzette nach Tröltzsch (Wilde), chirurgisch, 1:2 Zähne, in Tuttlinger-Qualität.

9511232 1 St. 12 cm **11,70**

KLEMMEN IN TUTTLINGER-QUALITÄT

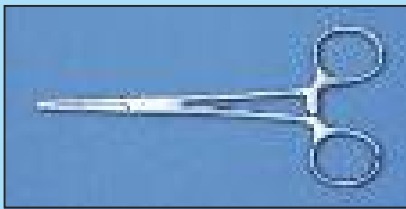


Klemme

8125698 1 St. Pean gerade 14,5 cm **10,90**



Klemme

8169307 1 St. Mosquito gerade 12,5 cm **11,50**

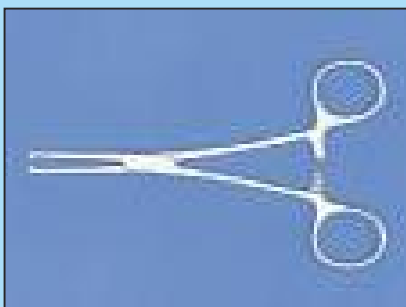

Klemme

8169313 1 St. Kocher gerade 14,5 cm **10,90**



Tuchklemme

8169336 1 St. Backhaus 11 cm **10,90**

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM



Instrumentensatz 9-teilig

Bestehend aus:

- 1 Irisschere gerade sp/sp 11,5 cm
- 1 chir. Schere gebogen sp/st 14 cm
- 1 chir. Schere gerade sp/st 14 cm
- 1 Lister Verbandsschere 18 cm
- 1 Kornzange gerade 20 cm
- 1 anatom. Pinzette schmal 14 cm
- 1 anatom. Pinzette 14 cm
- 1 chir. Pinzette 1:2 Zähne 14 cm
- 1 Splitterpinzette 11,5 cm.

8112088 1 St. in Tuttlinger Qualität **79,00**



Kornzange mit Sperre

Instrument in Tuttlinger-Qualität.

8125758 1 St. gerade 25 cm **23,50**
 8125818 1 St. gebogen 25 cm **23,50**



Nadelhalter

Instrument in Tuttlinger-Qualität. Nadelhalter Mayo-Hegar.

9403339 1 St. Mayo Hegar 16 cm **15,90**
 8302752 1 St. Mayo Hegar 18 cm **18,90**




Nadelhalter

Instrument in Tuttlinger-Qualität. Nadelhalter nach Mathieu.

8169365 1 St. Mathieu 14 cm **25,50**

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM

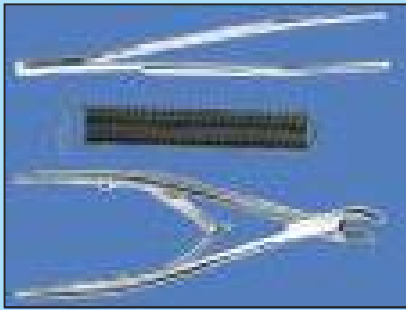

Nahtpinzette

Michel-Nahtpinzette, Tuttlinger-Qualität.

9511237	1 St. 12 cm	11,95
---------	-------------	-------

Wundklammerzange Michel

In Tuttlinger-Qualität, nach Michel.

9511236	1 St. 12 cm	21,50
---------	-------------	-------

Wundklammern

Michel Wundklammern, 14 x 3 mm.

9511238	100 St.	7,00
---------	---------	------



Wundklammerzange Collin

In Tuttlinger-Qualität.

9511239	1 St. 13 cm	29,00
---------	-------------	-------



Scharfer Löffel nach Volkmann

Instrument in Tuttlinger-Qualität.

9400540	1 St. Fig. 0	16,20
9400541	1 St. Fig. 1	16,20
9400542	1 St. Fig. 2	16,20
9400543	1 St. Fig. 3	16,20
9400544	1 St. Fig. 4	16,20
9400545	1 St. Fig. 5	16,20




Komedonenquetscher

Instrument in Tuttlinger-Qualität nach Saalfeld.

9510732	1 St. 14 cm	10,95
---------	-------------	-------

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM

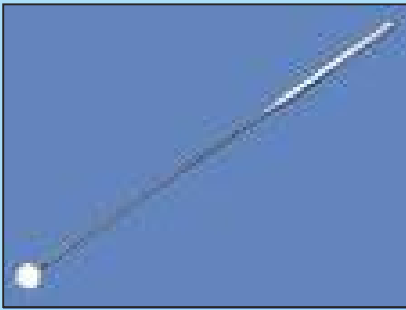

Kehlkopfspiegel

Mit Griff.

9510735	1 St. Fig. 1 Durchmesser 12 mm	4,60
9510736	1 St. Fig. 2 Durchmesser 14 mm	4,60
9510737	1 St. Fig. 3 Durchmesser 16 mm	4,60



Kappenzange

Gross-Maier Zange und Standzylinder.

9510714	1 St.	85,70
---------	-------	-------



Zeckenpinzette

Zeckenpinzette aus Edelstahl, sterilisierbar. Für die Anwendung bei Mensch und Tier.

8226260	1 St.	4,20
---------	-------	------



Mastdarmspekulum SIMS

Nach SIMS 15 cm, Tuttlinger-Qualität.

9510733	1 St.	58,70
---------	-------	-------

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM



Mastdarmspekulum

Nach Bodenhammer, 15 cm, Tuttlinger-Qualität.

9510734	1 St.	58,70
---------	-------	-------



Nasenspekulum

Nach Hartmann-Halle, 15 cm, Tuttlinger-Qualität.

9510738	1 St. Fig. 1	36,60
9510739	1 St. Fig. 2	36,60
9510740	1 St. Fig. 3	36,60



Vaginal-Spekulum CUSCO

CUSCO, Tuttlinger-Qualität.

9510741	1 St. für Jungfrauen 75 x 17 mm	22,35
9510745	1 St. klein 75 x 32 mm	18,70
9510746	1 St. mittel 85 x 35 mm	18,70
9510747	1 St. groß 100 x 35 mm	18,70

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM

Vaginal-Spekulum CUSCO Schweizer Modell (ohne Abbildung)

Spekulum in Tuttlinger-Qualität.

9510742	1 St. klein 90 x 23–25 mm	19,40
9510743	1 St. mittel 100 x 25–27 mm	19,40
9510744	1 St. groß 110 x 27–30 mm	19,40



Vaginal-Spekulum Kristeller

Kristeller lang, Spekulum – Satz 22 cm, Tuttlinger-Qualität.

9510748	1 Satz 110 x 18 mm	36,00
9510749	1 Satz 110 x 20 mm	36,00
9510750	1 Satz 110 x 27 mm	34,40
9510751	1 Satz 110 x 30 mm	34,40
9510752	1 Satz 110 x 36 mm	34,40

Uterusdilator

Nach Hegar, einendig.

9511240	1 St. 1,0 mm	5,90
9511241	1 St. 5,5 mm	5,90
9511242	1 St. 6,0 mm	8,90
9511243	1 St. 6,5 mm	8,90
9511244	1 St. 7,0 mm	9,00
9511245	1 St. 7,5 mm	9,00
9511246	1 St. 8,0 mm	9,00
9511247	1 St. 8,5 mm	9,00
9511248	1 St. 9,0 mm	9,50
9511249	1 St. 9,5 mm	9,50
9511250	1 St. 10,0 mm	9,50



Uteruskürette SIMS

In Tuttlinger Qualität, 26 cm lang.

9510907	1 St. scharf fest Fig. 00	28,00
9510908	1 St. scharf fest Fig. 0	28,00
9510909	1 St. scharf fest Fig. 1	28,00
9510910	1 St. scharf fest Fig. 2	28,00
9510911	1 St. scharf fest Fig. 3	28,00
9510912	1 St. stumpf biegsam Fig. 00	28,00
9510913	1 St. stumpf biegsam Fig. 0	28,00
9510914	1 St. stumpf biegsam Fig. 1	28,00
9510915	1 St. stumpf biegsam Fig. 2	28,00
9510916	1 St. stumpf biegsam Fig. 3	28,00


■ SONSTIGES INSTRUMENTARIUM



Uterussonde SIMS

In Tuttlinger-Qualität.

9510905	1 St. 32 cm starr	14,50
9510906	1 St. 32 cm biegsam	14,50

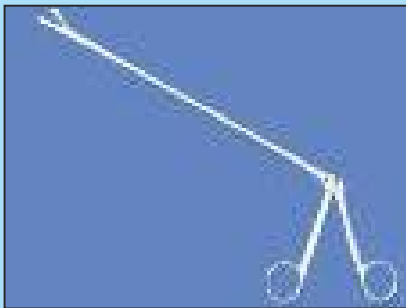

Biopsiezange

Probeextensionszange nach Schumacher: Schaft 24 cm, deutsche Qualität.

9511233	1 St. Fig. 1	175,00
9511234	1 St. Fig. 2	175,00



Gippschere

Tuttlinger-Qualität, nach Stille.

9510753	1 St. 26 cm	105,00
---------	-------------	--------




Gipsabreißzange

Nach Wolff. Tuttlinger-Qualität.

9510754	1 St. 18 cm	36,40
---------	-------------	-------

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM

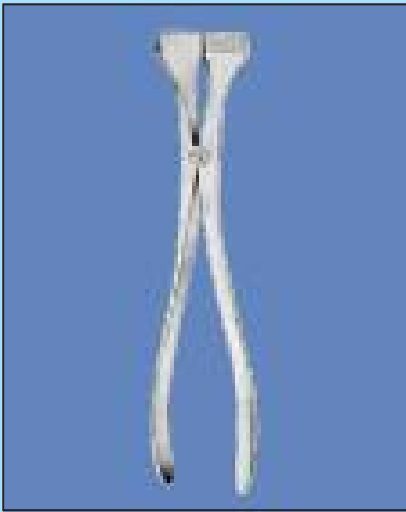

Gipsspreizer

Nach Henning, Tuttlinger-Qualität.

9510755	1 St. 27 cm	59,00
---------	-------------	-------



Gipssäge oszillierend

Gerät mit handgerechtem modernem Styling, äußerst robustes Gehäuse und kraftvoller Motor mit hochwertigem Getriebe. Wartungsfrei, Lieferung mit 2 rostfreien Sägeblättern 50 mm und 65 mm sowie 2 Schraubenschlüsseln.

8302887	1 St.	398,00
---------	-------	--------

Gipssägeblatt

Ersatzsägeblätter für Gipssäge.

8302893	1 St. 50 mm	14,90
8302918	1 St. 65 mm	14,90
8302901	1 St. 50 mm für Hartverband	17,90
8302924	1 St. 65 mm für Hartverband	17,90




Fingerringsäge

9510904	1 St.	26,50
---------	-------	-------

Nagelausreißzange RADOLF (ohne Abbildung)

9510903	1 St. 13,5 cm	36,50
---------	---------------	-------

SONSTIGES INSTRUMENTARIUM

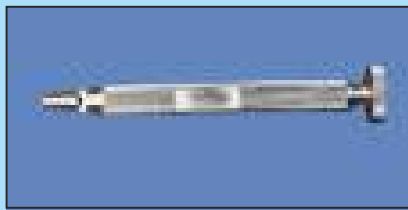

Nagelbohrer

Komplett mit 3 Bohrern.

9510902 1 St. 38,00


SKALPELLE



Skalpelle AESCULAP®

Einmal-Skalpelle, einzeln steril verpackt. Mit verbesserter Spitze.

8112284	10 St. Fig. 10	3,50	ab 5	3,20
8112285	10 St. Fig. 11	3,50	ab 5	3,20
8112286	10 St. Fig. 12	3,50	ab 5	3,20
8112287	10 St. Fig. 15	3,50	ab 5	3,20
8112288	10 St. Fig. 18	3,50	ab 5	3,20
8112289	10 St. Fig. 19	3,50	ab 5	3,20
8112290	10 St. Fig. 20	3,50	ab 5	3,20
8112291	10 St. Fig. 21	3,50	ab 5	3,20
8112292	10 St. Fig. 22	3,50	ab 5	3,20
8112293	10 St. Fig. 23	3,50	ab 5	3,20
8112294	10 St. Fig. 24	3,50	ab 5	3,20

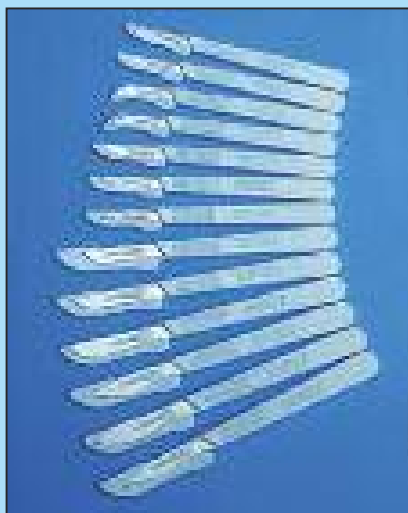


Skalpelle FEATHER®

Einmal-Skalpelle, mit Kunststoffhandgriff, gehärtete Edelstahlklinge, einzeln steril verpackt.

8305880	20 St. Fig. 10	7,75
8305897	20 St. Fig. 11	7,75
8305905	20 St. Fig. 12	7,75
8305911	20 St. Fig. 15	7,75
8305928	20 St. Fig. 20	7,75
8305934	20 St. Fig. 21	7,75
8305940	20 St. Fig. 22	7,75
8305957	20 St. Fig. 23	7,75
8305963	20 St. Fig. 24	7,75
8134579	20 St. Fig. 25	7,75

SKALPELLKLINGEN UND -GRIFFE

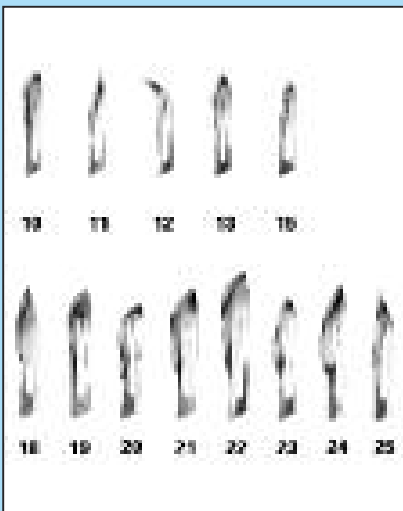

Skalpellklingen AESCULAP®

Einmal-Skalpellklingen. Mit verbesserter Spitze. Einzeln steril verpackt.

8112295	100 St. Fig. 10	9,50
8112296	100 St. Fig. 11	9,50
8112297	100 St. Fig. 12	9,50
8112298	100 St. Fig. 13	9,50
8112300	100 St. Fig. 15	9,50
8112302	100 St. Fig. 18	9,50
8112303	100 St. Fig. 19	9,50
8112304	100 St. Fig. 20	9,50
8112301	100 St. Fig. 21	9,50
8112305	100 St. Fig. 22	9,50
8112306	100 St. Fig. 23	9,50
8112308	100 St. Fig. 24	9,50
8112309	100 St. Fig. 25	9,50



Skalpellgriff

Skalpellgriff aus Metall, passend für Feather und Aesculap. Tuttlinger-Qualität.

8118818	1 St. Größe 3 für Klingen 10-15	3,50
8118824	1 St. Größe 4 für Klingen 18-25	3,50



Skalpellklingen Bayha

Skalpellklingen, steril. Einzeln verpackt.

8300374	12 St. Fig. 11	3,45	ab 12	3,10
8300380	12 St. Fig. 15	3,45	ab 12	3,10
8143294	12 St. Fig. 16	3,45	ab 12	3,10
8300397	12 St. Fig. 18	3,45	ab 12	3,10
8300405	12 St. Fig. 19	3,45	ab 12	3,10
8300411	12 St. Fig. 20	3,45	ab 12	3,10
8300428	12 St. Fig. 21	3,45	ab 12	3,10
8300434	12 St. Fig. 22	3,45	ab 12	3,10
8300440	12 St. Fig. 23	3,45	ab 12	3,10
8300457	12 St. Fig. 24	3,45	ab 12	3,10
8300463	12 St. Fig. 26	3,45	ab 12	3,10
8300486	12 St. Fig. 27	3,45	ab 12	3,10
8300492	12 St. Fig. 28	3,45	ab 12	3,10
8300500	12 St. Fig. 29	3,45	ab 12	3,10

EINMAL-INSTRUMENTARIUM

PEHA®-instrument

Hochwertige chirurgische Instrumente von HARTMANN für den Praxisbetrieb.

Einmalinstrumente sicher einzeln und steril verpackt und jederzeit einsatzbereit durch den praktischen Dispenser. Hochwertige Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl. Peha-instrument gewährleisten die gleiche Handhabung und das gleiche Behandlungsergebnis wie Mehrweginstrumente. Sehr wirtschaftlich durch geringe Anschaffungskosten, keine Aufbereitungs- und Reparaturkosten.



Chirurgische Scheren

9511415	25 St. gerade spitz / stumpf 14,5cm (Abbildung)	66,15
9511416	25 St. gerade stumpf/stumpf 14,5cm	66,15
9511417	25 St. gerade spitz / spitz 13cm	66,15



Irisschere

9511420	25 St. gerade 11,5 cm	66,15
9511421	25 St. gebogen 11,5 cm	66,15



Pinzetten

9511410	25 St. Chirurgische Standard gerade 14 cm (Abbildung)	50,90
9511411	25 St. Anatomische Standard gerade 14 cm	50,90



Nadelhalter Mayo-Hegar

9511398	25 St. gerade 14 cm	64,50
9511399	25 St. gerade 12 cm	64,50

Weitere Instrumente auf Anfrage.

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer

■ EINMAL-INSTRUMENTARIUM



SUSI Schere fein

Steriles Einmal-Instrumentarium.

9510811	20 St. spitz/spitz gerade 11 cm	60,50
---------	---------------------------------	--------------



SUSI Schere chirurgisch

Steriles Einmal-Instrumentarium.


9510812	20 St. spitz/stumpf gerade 14,5 cm	60,50
---------	------------------------------------	--------------



SUSI Pinzette ADSON

Steriles Einmal-Instrumentarium.

9510814	20 St. anatomisch fein 12 cm	22,20
9510815	20 St. chirurgisch fein 1 x 2 Zähne 12 cm	22,20

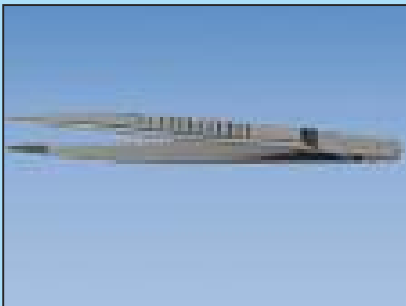

SUSI Pinzette

Steriles Einmal-Instrumentarium.

9510816	20 St. anatomisch 14,5 cm	20,20
9510817	20 St. chirurgisch 1 x 2 Zähne 14,5 cm	20,20



SUSI Tupferzange

Steriles Einmal-Instrumentarium.

9510818	20 St. gebogen 20 cm	42,50
9510819	20 St. gebogen 26,5 cm	44,90

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer



Einfach, sicher, wirtschaftlich.

Mit SUSI stehen Ihnen bei jedem Eingriff neue, steril verpackte Instrumente **in Aesculap Qualität** zur Verfügung. Die **zeit- und kostenintensive Aufbereitung** von Einzelinstrumenten **entfällt komplett**.

SUSI ist ideal für kleine Eingriffe auf **Stationen**, in **Ambulanzen** und im Bereich der **niedergelassenen Ärzte** geeignet (Versorgung von Platzwunden oder chronischer Wunden, Verbandswechsel, usw).

Der eingesetzte Werkstoff, ein **glasfaserverstärktes Hochleistungspolymer**, ermöglicht eine sichere und **umweltgerechte Entsorgung** durch Verbrennung. Die Emissionswerte gleichen denen bei der **Verbrennung von Holz**.

Einfach

- Spenderboxen sorgen für **eine einfache Logistik** und die sterile Bereitstellung.



Sicher

- SUSI Instrumente ermöglichen eine **gleichbleibend hohe Qualität der Instrumente**. Nicht mehr funktionsfähige Instrumente gehören der Vergangenheit an.
- Die Gefahr der **Rostübertragung**, von den minderwertigen Stationsinstrumenten auf das hochwertige OP-Instrumentarium **entfällt!**
- **Aesculap gewährleistet für die Sterilität** der Instrumente über **5 Jahre!**

Wirtschaftlich

- Der aufwendige **Aufbereitungsprozess entfällt!**
- **Schwund** von Instrumenten **ist kein Thema mehr!** Die daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen entfallen.
- **Keine Reststerilisationen** mehr notwendig.

EINMAL-INSTRUMENTARIUM



SUSI Pean-Klemme

Steriles Einmal-Instrumentarium, Arterienklemme Pean.


9510820 20 St. gerade 14,5 cm **33,60**



SUSI Nadelhalter Mayo-Hegar

Steriles Einmal-Instrumentarium.

9510821 20 St. 15 cm **61,40**

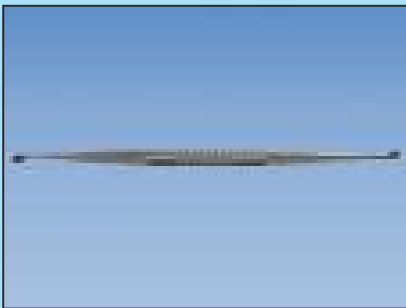

SUSI Scharfer Löffel

Steriles Einmal-Instrumentarium, Scharfer Löffel. Rundes Arbeitsende 7 mm, ovales Arbeitsende 9 x 6 mm.

9510822 20 St. 21,5 cm **42,50**



Biopsy Punch

Hautstanze, steriles Einmalinstrument zur präzisen und schonenden Curettage, mit extrem scharfer Edelstahlschneide und ergonomischem Griff. Nicht in allen Regionen als Sprechstundenbedarf abrechenbar.

9400420	20 St. 2 mm	43,00
1461996	20 St. 4 mm	43,00
9400421	20 St. 5 mm	43,00
3010660	20 St. 6 mm	43,00
1462027	20 St. 8 mm	43,00



Einmal-Pinzette Centramed

Anatomische Einmal-Pinzetten, glasklar. Einzeln steril verpackt.

8124658 50 St. steril **6,00**

EINMAL-INSTRUMENTARIUM



Einmal-Rasierer Centramed

Centramed Fertig-Rasierer zum Einmalgebrauch. Keine Verletzungsgefahr, sanft und sicher. Einschneidig, blau.

6391036	100 St. einschneidig, blau	8,40
---------	----------------------------	------



Einmal-Rasierer Wilkinson

Fertig-Rasierer, zum Einmalgebrauch, mit 3fach veredelter Klinge. Rasiert jede Haarlänge sanft, sicher und hautschonend. Einschneidig oder Doppelschneidig für eine noch gründlichere Rasur.

8124718	100 St. einschneidig	11,40
8127763	100 St. doppelschneidig	13,35



Precise™ Einweg-Hautklammergerät

Hautklammermagazin aus Kunststoff für einen schnellen und effektiven Wundverschluss. Steril, zum Einmalgebrauch.

2759077	12 St. DS15 15 Klammern	118,32
8129354	12 St. DS25 25 Klammern	158,52

Precise™ Klammerentferner

Einweg-Hautklammerentferner für Precise Klammern.

2759114	10 St.	58,00
---------	--------	-------

EINMAL-INSTRUMENTARIUM



Fadenziehmesser Stich Cutter

Fadenziehmesser, einzeln steril eingeschweißt, 11 cm lang.

8124457 100 St. 19,65




Zeckenzange

Zeckenzange aus Kunststoff, grün.

9402285 1 St. 1,95

INSTRUMENTENZUBEHÖR

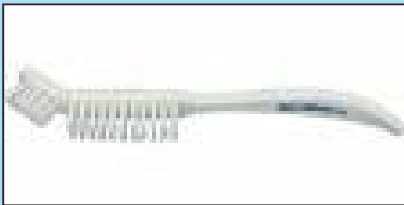

Instrumenten-Reinigungsbürste

Für hartnäckige Verschmutzungen mit extra harten Kunststoffborsten. Waschbar und autoklavierbar.

9510917 1 St. 3,60



Instrumentensprühöl

Sprühöl für Chirurgie- und Dentalinstrumente. Beugt der Rostbildung vor, schmiert bewegliche Teile und vermindert metallischen Abrieb. Die Instrumente werden nach der Reinigung und vor der Sterilisation besprüht. FCKW- und phosphatfrei.

8305609 400 ml 4,90



Instrumenten-Ölspray Sterilit

Aesculap Spezialölspray zur Pflege hochwertiger Instrumente nach der Reinigung und vor der Sterilisation, wasserdampfdurchlässig.

9400396 300 ml Dose 9,95

INSTRUMENTENZUBEHÖR



Instrumentenschale

Instrumentenschale aus Melamin, weiß.

8308074	1 St. 29 x 16 x 3,5 cm	5,40
8117598	1 St. 19 x 15 x 4 cm	4,10
8117606	1 St. 29 x 16 x 6 cm	6,85
8117612	1 St. 34 x 25 x 10 cm	13,50
8109392	1 St. 35 x 25 x 4 cm	10,55



Instrumententablett

Instrumententablett aus Melamin, weiß.

8307991	1 St. 19 x 15 x 1,7 cm	3,30
8308016	1 St. 24 x 18 x 1,7 cm	4,10
8308045	1 St. 30 x 19 x 1,7 cm	5,45
8308051	1 St. 35 x 24 x 1,7 cm	7,95
8308068	1 St. 42 x 28 x 1,7 cm	13,20



Instrumentenschale

Schale aus Melamin zur Aufbewahrung von z.B. Instrumenten. Bruchunempfindlich, oberflächenhart, spülmaschinenfest. Ohne Deckel.

8142623	1 St. 28 x 21 x 6 cm	13,90
---------	----------------------	-------

Deckel für Instrumentenschale

Deckel klar für Instrumentenschale 8142623. Bruchfest, spülmaschinenfest.

9400486	1 St.	3,90
---------	-------	------



Skin Marker Fine

Farbstift zur Hautmarkierung, dünne Spitze. Wasserbeständig, steril. Mit aufgedrucktem Lineal. Entfernung durch alkoholische Lösungen.

8118066	1 St.	2,10
---------	-------	------

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Sterilisator Autoklav Euroklav® 23 VS+

Empfohlen für alle nicht-operierenden Disziplinen und alle Praxen, die einfache Instrumente (z.B. Scheren, Spekula) – auch verpackt – oder Tupfer sterilisieren. Mit einfachem Vor- und Nachvakuum. Entspricht allen Forderungen der Klasse S der Europa Norm EN 13060. Kessel Durchmesser 25 x 45 cm, Volumen 22 Liter. Gerät fasst bis zu 6 Tablett.

8111435	1 St. Klasse S, ohne Tablett und ohne Zubehör	4455,00
---------	---	----------------

Sonder-Paket

Inklusive:

- 3 Tablett
- Wasser-Aufbereitungsanlage MELAdem 40
- Dokumentation MELAflash CF-Card-Printer zum Einlesen der Sterilisierdaten und Archivierung über PC

9410120	1 St. Klasse S, mit Zubehör	4945,00
---------	-----------------------------	----------------



Sterilisator Autoklav Vacuklav® 44-B

Die Premium-Klasse von MELAG. Der Autoklav entspricht der „Klasse B“ nach der Europa-Norm EN 13060. Großes, graphisches Display, verständlich und übersichtlich. Mit Schnittstelle zum direkten Anschluss an das Praxis-Netzwerk. Schnellprogramm „S“ in ca. 8 Min., Schnellprogramm „B“ in 17 Min. inkl. Trocknung, Universalprogramm inkl. Vakuum-Trocknung in nur 30 Min. für 6 kg verpackte Instrumente. Mit Festwasseranschluss und fraktioniertem Vor- und Nachvakuum.

9402120	1 St. Klasse B, ohne Tablett	8295,00
---------	------------------------------	----------------



Tablett für Euroklav® und Vacuklav®

Tablett für Vacuklav 24 B und Euroklav 23 VS (Geräte fassen jeweils bis zu 5 Stück) sowie Vacuklav 44-B (Gerät fasst bis zu 6 Stück).

8181053	1 St.	48,00
---------	-------	--------------

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Sterilisator Autoklav Vacuklav® 24 B+

Empfohlen für alle operierenden Disziplinen und alle Praxen, die Hohlkörperinstrumente sterilisieren. Mit fraktioniertem Vor-Vakuum und Vakuum-Nachtrocknung, erfüllt die Forderungen der Klasse B der Europa Norm EN 13060. Monitoring-System, serielle Schnittstelle zur Dokumentation mit PC, Drucker oder Kartenschreiber. Vollautom. Ablauf durch Mikroprozessor-Steuerung; 22,6 l. Mit Festwasseranschluss.

8111421	1 St. Klasse B, ohne Tablett und ohne Zubehör	7125,00
---------	---	---------

Sonder-Paket

Inklusive:

- 3 Tablett
- Wasser-Aufbereitungsanlage MELAdem 40
- Dokumentation MELAflash CF-Card-Printer zum Einlesen der Sterilisierdaten und Archivierung über PC
- Prüfkörper MELAcontrol

9410125	1 St. Klasse B, mit Zubehör	7345,00
---------	-----------------------------	---------

Sterilisator Autoklav Vacuklav® 23 B+

Stand-alone-Gerät ohne Festwasseranschluss! Mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum, Kessel-Durchmesser 25 x 45 cm, Volumen 22 Liter.

Sonder-Paket

Inklusive:

- 3 Tablett
- Wasser-Aufbereitungsanlage MELAdest 65
- Dokumentation MELAflash CF-Card-Printer zum Einlesen der Sterilisierdaten und Archivierung über PC
- Prüfkörper MELAcontrol

9410126	1 St. Klasse B, mit Zubehör	7590,00
---------	-----------------------------	---------

MELAG
competence in hygiene



Sterilisierbehälter MELAG

Nach Europannorm EN 868-8. Mit Perforation im Boden und Deckel. Inkl. 100 auswechselbare Einmal-Filterpapiere. Maße L x B x H.

9401470	1 St. Typ 15K	18 x 12 x 4,5 cm	117,00
9401472	1 St. Typ 15M	32 x 12 x 4,5 cm	158,00
9401474	1 St. Typ 15G	32 x 12 x 8 cm	188,00
9401475	1 St. Typ 17K	20 x 14 x 5 cm	134,00
9401477	1 St. Typ 17M	41 x 14 x 5 cm	176,00
8181082	1 St. Typ 23M	42 x 16 x 6 cm	219,00
9401480	1 St. Typ 17G	41 x 14 x 9 cm	197,00
9401478	1 St. Typ 23G	42 x 16 x 12 cm	234,00
9401482	1 St. Typ 28M	32 x 16 x 6 cm	187,00
9401479	1 St. Typ 28G	32 x 16 x 12 cm	219,00

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR

Tupfertrommel MELAG

Tupfertrommeln von MELAG mit Filtertuch.

9401484	1 St. Typ 17R Durchmesser 13 x 10,5 cm	145,00
9401485	1 St. Typ 23R Durchmesser 18 x 14 cm	181,00



MELAdest® 65 Destilliergerät

Die halbautomatische Alternative zur kostensparenden Herstellung und Verwendung von destilliertem Wasser für den Autoklaven. Das Wasser wird manuell in den Vorratsbehälter des Autoklaven eingefüllt. Bei den Vacuklav- und Euroklav-Modellen kann es wahlweise aus dem MELAdest-Vorratskanister autom. angesaugt werden. Inkl. Vorratskanister.

8145755	1 St.	330,00
---------	-------	--------



MELAdem® 40 Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem 40 speist automatisch hochwertiges nach dem Ionenaustausch-Prinzip demineralisiertes Wasser in die Autoklaven Vacuklav und Euroklav ein. Zur Befestigung im Unterschrank, an der Wand oder am Autoklaven. Sprühpistole optional.

9678384	1 St.	365,00
---------	-------	--------

MELAJet® Sprühpistole

Optionales Zubehör zur MELAdem 40 Wasser-Aufbereitungsanlage. Die Sprühpistole ermöglicht die Entnahme von demineralisiertem Wasser für andere Zwecke.

9402117	1 St.	101,00
---------	-------	--------

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



MELAseal® 100+ Siegelgerät

Dauerbeheiztes Siegelgerät für Klarsicht-Sterilisierverpackungen. Nach 2 Minuten Anheizzeit im Dauerbetrieb einsetzbar. Optisches und akustisches Signal bei Fehlbedienung zur Überwachung des einwandfreien Siegelvorgangs.

8112335	1 St. ohne Rollenhalter	575,00
---------	-------------------------	--------



Rollenhalter

Praktische Rollenhalter für MELAseal® 100+ für ein müheloses Nachführen der Klarsicht-Sterilisierverpackung. Mit integrierter Abschneide-Vorrichtung.

9401490	1 St. standard	59,00
9401492	1 St. komfort (Abbildung mit Gerät)	55,00
8158580	1 St. Wandrollenhalter	55,00



MELAcontrol®

Prüfsystem, dient nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktionen des fraktionierten Vor-Vakuums eines „Klasse B“ Autoklaven. Bestehend aus 1 Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen.

9402122	1 St. Praxis-Set	148,00
---------	------------------	--------



MELAdoc® Etikettendrucker

Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen. Die Etiketten werden auf die Verpackung geklebt und enthalten Angaben über Sterilisierdatum, Verfalldatum, Bedienperson und Chargennummer des Sterilisationszyklus. Inkl. 1 Rolle Etiketten (750 St.).

9402124	1 St.	335,00
---------	-------	--------

Ersatzetiketten

Ersatzrollen á 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze für MELAdoc Etikettendrucker.

9410317	6 St.	33,00
---------	-------	-------

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Autoklav Sterilisator „Klasse B“ Bmax ECCOspeed

Klasse B Autoklav nach Europeanorm DIN EN 13060 mit fraktioniertem Vorvakuum und vollständiger, gepulster Vakuumtrocknung. Einfachste Bedienung durch intuitives Touch-Screen. Kompaktes Gerät: 455 x 410 x 520 mm (B x H x T). Service nur alle 4000 Zyklen notwendig. 2 Jahre oder 2000 Zyklen Garantie.

Dokumentation digital auf Speicherkarte oder über Drucker (optional). Schnelle Zyklen inklusive Trocknung in nur 24 Minuten.

Im Lieferumfang enthalten:

- Drehbarer Tray-Träger
- 5 Aluminiumtrays
- Tray-Zange
- Einfülltrichter
- Ablaufschlauch für Brauchwasser
- Dokumentation nach EN 13060
- Schulungs-CD-ROM
- Sicherheitszertifikat
- Poster und Informationspaket
- Helix-Test Starter Kit.

9511324	1 St. 17 mit komplettem Lieferumfang Abmessungen: L x H x T: 455 x 410 x 520 mm, Sterilisationskammer 17 Liter: Ø 250/T: 350 mm	5990,00
9511325	1 St. 22 mit komplettem Lieferumfang Abmessungen: L x H x T: 455 x 410 x 620 mm, Sterilisationskammer 22 Liter: Ø 250/T: 450	6590,00



Digitale Dokumentation madriLOG

- Digitale Datenaufzeichnung der Sterilisationszyklen auf Speicherkarte.
- Speicherkapazität: 12.000 Zyklen
- Speicher-Daten über USB-Anschluss in PC einlesbar, keine spezielle Software notwendig
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 13060 (§ 4.4.4.3 Registriergeräte mit digitaler Aufzeichnung).

9511326	1 St. inkl. Speicherkarte, Lesegerät	540,00
---------	--------------------------------------	---------------



Drucker madriPrint

Drucker für sichere Rückverfolgbarkeit und Archivierung der Sterilisationszyklen.

9511327	1 St. inkl. Druckerrolle und Druckerpatrone	530,00
---------	---	---------------

MADRImed
Medizintechnik GmbH

Alle Preise in EUR zzgl. gültiger Mehrwertsteuer



MADRImed

Medizintechnik GmbH

Ein Familienunternehmen mit Sitz in Österreich

Mit weltweit über **40.000** verkauften Geräten liegt der **Bmax** von MADRImed klar im Spitzensegment. Die jahrzehntelange Erfahrung, die eigene Forschung und Entwicklung, in Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Spezialisten und die Produktionsqualität an innovativen, hoch technisierten Produktionsstandorten, bilden die Basis für die einzigartigen, kostengünstigen Lösungen und das weltweite Service von MADRImed.

Bmax ECOSpeed – der neue Sterilisator von MADRImed.



**Ökonomisch, schonend,
einfach, schnell und sicher.**

Bmax
ECO speed

- Absolut sicher: 100% „Klasse B“ bei allen Zyklen.
- Patentiertes Dampfgeneratorsystem schont das Gerät und Instrument.
- Kompaktes Gerät mit integriertem Wassertank: platzsparend und leise.
- Plug & Play: Einfachste Bedienung: Aufstellen, einstecken, sterilisieren.

MADRImed
Medizintechnik GmbH
Werner-Bader-Straße 1
A-5111 Bürmoos, Austria

T: +43-6274-6236-105
F: +43-6274-6236-106
office@madrimed.com
www.madrimed.com

madri[®]
med

STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Steribeutel selbstklebend

Steribeutel, mit Selbstklebeverschluss, für die Dampfsterilisation, mit Indikator.

8110677	200 St.	90 x 250 mm	13,50
8110681	200 St.	190 x 330 mm	37,00
8110678	200 St.	140 x 260 mm	22,00
8110680	200 St.	135 x 355 mm	29,50

Sterilfolie flach

Für die Dampfsterilisation Klarsicht-Sterilisier-Verpackung nach ISO 11607, zur kontaminationsgeschützten Aufbewahrung von Sterilgut. Papierfolienkombination. Keimdicht, reißfest, hochtransparent. Rolle.

8119491	1 St.	200 m x 5,0 cm	12,85
8119516	1 St.	200 m x 7,5 cm	17,40
8119522	1 St.	200 m x 10,0 cm	19,90
8119539	1 St.	200 m x 15,0 cm	29,80
8119545	1 St.	200 m x 20,0 cm	41,00

Sterilfolie

Für die Dampfsterilisation Klarsicht-Sterilisier-Verpackung nach ISO 11607, zur kontaminationsgeschützten Aufbewahrung von Sterilgut. Papierfolienkombination. Keimdicht, reißfest, hochtransparent. Rolle. Mit Seitenfalte.

8119551	1 St. mit Falte	100 m x 7,5 cm	27,00
8119568	1 St. mit Falte	100 m x 10,0 cm	30,70
8119574	1 St. mit Falte	100 m x 15,0 cm	42,00
8119597	1 St. mit Falte	100 m x 20,0 cm	51,00
8119605	1 St. mit Falte	100 m x 25,0 cm	69,00

Sterilisationsbögen halbkrepp

Sterilisationsbögen in grün für die Dampf- und Gassterilisation

9410147	500 St.	60 g/m ² 50 x 50 cm	32,00
9410149	500 St.	60 g/m ² 60 x 60 cm	44,50
9410150	250 St.	60 g/m ² 75 x 75 cm	34,90



Sterilisationsklebeband

Sterilisationsklebeband mit und ohne Indikator. Länge 50 m, Breite 19 mm.

8111455	1 St.	Autoklavband ohne Indikator	1,45
8111452	1 St.	mit Indikator für die Dampfsterilisation	2,45

■ STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Bowie & Dick

Geeignet für den Bowie & Dick-Test in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vakuum, zur Überprüfung der Luftentfernung aus Sterilgütern und Kammern bzw. Dampfdurchdringung. Schwermetallfrei – handhabungssicher – objektiv!

9410130 20 St. Einmaltestpaket **83,50**



Comply™ Bowie & Dick Test

3M™ Bowie und Dick Einmaltestpaket nach EN ISO 11140-4 für die Maschinenkontrolle. Schnelle und sichere Aussage, einfache Fehlererkennung.

8112279 20 St. Einmaltest nach DIN/EN **154,00**



Comply™ Bowie & Dick Test

Gebrauchsfertiges Testpaket zur täglichen Kontrolle des Dampfsterilisators. Nach ISO.

8112280 20 St. Einmaltest (ATI) nach ISO **99,00**


STERILISATOREN UND ZUBEHÖR



Attest™ Indikator

Für die Maschinenkontrolle. Biologisches Überwachungssystem für die Dampfsterilisatoren. Für die schnelle Eigenkontrolle ohne mikrobiologisches Labor.

8112281 100 St. Test-Ampullen **229,00**

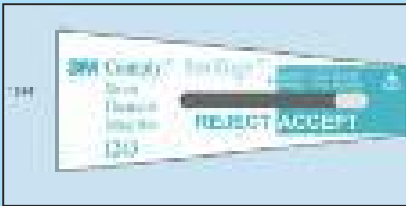

Comply™ SteriGage Integratoren

Sterilisationsprodukt für die Chargenkontrolle (Dampf). Hochwertiger Indikator, der sowohl physikalische als auch chemische Prozesse zur Kontrolle eines Verfahrens einsetzt. Das Ergebnis ist immer eindeutig.

8112283 100 St. **57,00**